

Nome

Myback Wellness Professional

DESTINAZIONE D'USO

Esecuzione di esercizi in scarico per la schiena e di stretching lombare

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


Partendo dalla posizione distesa sul lettino, a gambe flesse appoggiate sui due supporti anatomici, si potrà alzare il bacino a vari livelli grazie alla microregolazione del telecomando. Questa situazione mantenuta per alcuni minuti distende e decontrae la muscolatura lombare e riduce la pressione sulle vertebre lombari.

CONFIGURAZIONI

Myback Wellness Professional è un attrezzo modulare che può essere configurato in 3 modi differenti secondo le esigenze del proprio centro:

CONFIGURAZIONE N.1 (cod. 3390)


Il Myback è montato a terra su dei piedini regolabili e fissato su di un lettino imbottito scorrevole; soluzione che favorisce un agevole azione di manovra per l'esecuzione degli esercizi. Questa soluzione è consigliabile per i centri fitness da posizionare in sala attrezzi o nel "corner" posturale.

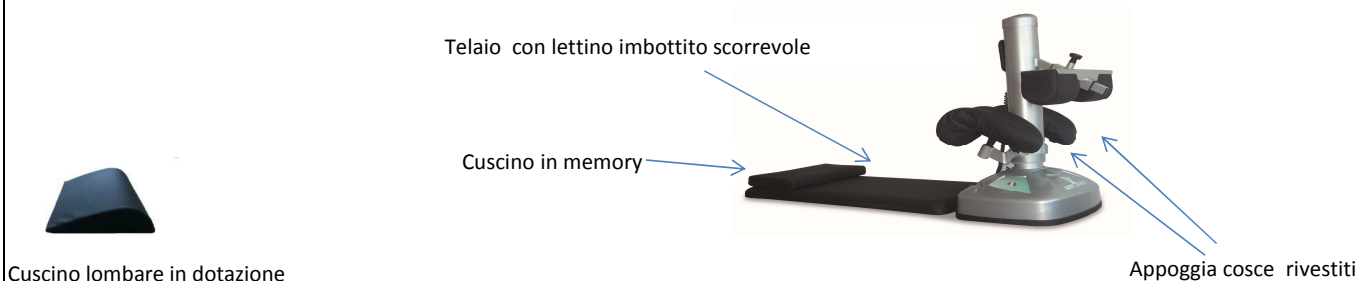

Larghezza	mm 490
Lunghezza massima (con lettino chiuso-aperto)	mm 1550 ; mm 1990
Altezza massima verticale (supporto giù-su)	mm 860; mm 1325
Peso complessivo attrezzatura	40 Kg

CONFIGURAZIONE N.2 (cod.3390 + kit cod.3866)


Stessa configurazione sopra ma montata a 70 cm da terra per mezzo di uno speciale kit di rialzo. Questa soluzione è consigliabile quando si vuole una migliore interazione con il soggetto (area personal, pre-massaggio, backschool).

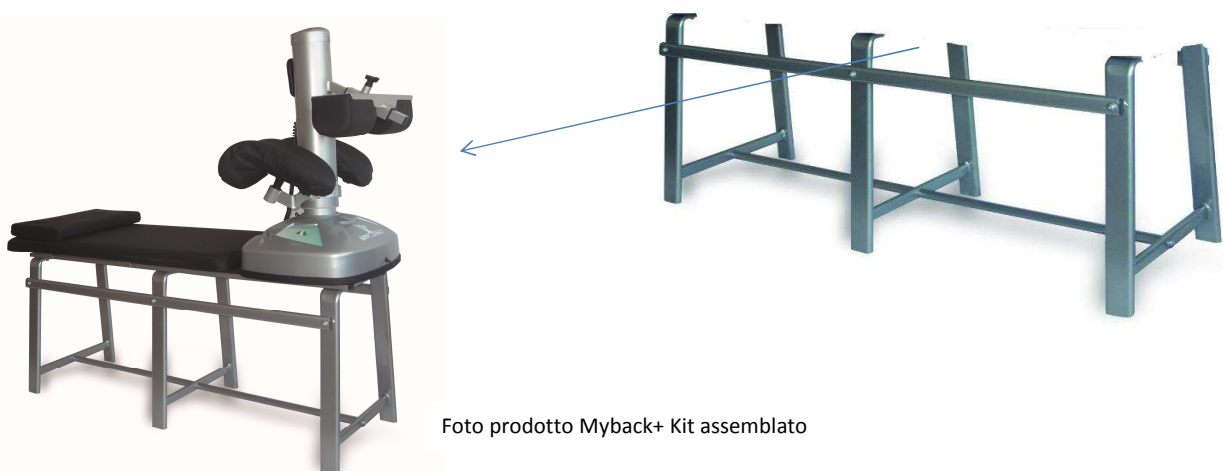

CONFIGURAZIONE N.3 (cod.3487PF)

Per i centri che hanno problemi di spazio ecco una soluzione che riduce al minimo gli ingombri. Il Myback viene fissato a terra su dei piedistalli senza telaio scorrevole ma munito di un normale tappeto fitness pieghevole.

QUESTA VERSIONE PRIVA DEL
TELAIO CON LETTINO
SCORREVOLE, DEVE ESSERE
UTILIZZATA CON DUE PIEDISTALLI
MOSTRATI

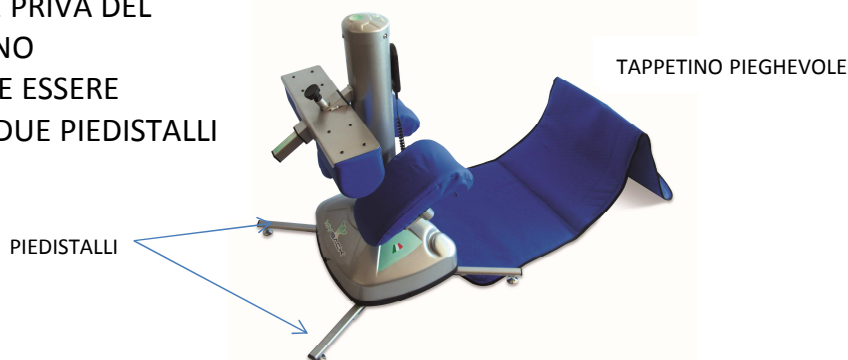

Dimensione della base con piedistalli montati	mm 730 x 730
Dimensione senza piedistalli montati	mm 490 x 350
Altezza massima verticale (supporto giù-su)	mm 860; mm 1325
Peso complessivo attrezzatura	30 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Peso massimo utilizzatore	130 Kg
Alimentazione elettrica	230/240 V ±10%
Accessori in dotazione	Cuscino per la testa, appoggiascose in memory, supporto lombare

RIFERIMENTI

Informazioni sul costruttore	Donati Srl Via Francesca Nord 50, 56010 Vicopisano (PI) ITALY
Certificazione attrezzatura	CE UNI EN 957-1 2006
Classe	S - uso professionale
Garanzia	36 mesi

MATERIALI PRINCIPALI

Telaio	Acciaio verniciato grigio
Protezioni	ABS
Rivestimenti	Nabuk col.nero
Imbotiture	Gommapiuma; Viscoelastico (memory)
Kit elettrico	Conforme direttive comunitarie 2006/95 CE; 2004/108 CE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lo stretching con myback wellness, riduce la pressione sui dischi vertebrali, distende e decontrae la muscolatura lombare facendo di questo attrezzo un ausilio importante per chiunque si occupi di educazione motoria, riabilitazione, preparazione atletica o backschool.

Può essere utilizzato come posizionatore antalgico lombare e con il cuscino lombare in dotazione si possono fare esercizi in estensione lombare quando occorre evitare un'eccessiva cifotizzazione.

Per la corretta esecuzione dell'esercizio si consiglia di eseguire le istruzioni riportate sul manuale d'uso, in ogni modo maggiori informazioni sono disponibili sul web

www.myback.it

L'attrezzo può essere utilizzato con operatore (soluzione consigliata per le prime volte) ed anche autonomamente dal soggetto, che abbia preso visione delle indicazioni riportate sul manuale o impartite dall'operatore



Esempio di utilizzo con il cuscino lombare